


Verwendung der Schraubendreher

FRIALIT®-2
Hex-Schraubendreher
Schlüsselweite 1,22 mm
24 Ncm

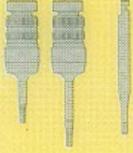

FRIALIT®-2
Aufbauschraube
Standard



FRIALIT®-2
MP PickUp Schraube
FRIALIT®-2
PickUp Schraube Classic



FRIALIT®-2
MP Schraube für
Kronbasis
Schraube für Kronbasis
Classic



FRIALIT®-2
MP Schraube für
Stegpfosten
Schraube für Stegpfosten
Classic



FRIALIT®-2
Attachment-
Schraube



FRIALIT®-2
Aufbauschraube
EstheticBase



FRIALIT®-2
Hex-Schraubendreher
Schlüsselweite 0,9 mm
14 Ncm



FRIALIT®-2
Horizontalschrauben



FRIALIT®-2
Gingivaformer



FRIALIT®-2
Einbringpfosten
für Implantate



FRIALIT®-2
Implantat-
Verschluss-Schraube




FRIALIT®-2
MP Verschluss-Schraube



FRIALIT®-2
MP Insert-Schraube



FRIALIT®-2
Schraubendreher
Klingenbreite 2,0 mm
14 Ncm

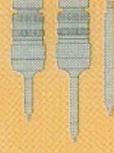

FRIALIT®-2
Eindrehinstrument
für MP Insert-
Schraube
24 Ncm



Alle verschraubbaren Systemkomponenten sind mit Sechskant und Schraubenschlitz ausgestattet. Die Schraubendreher-Einsätze für die Ratsche haben eine Drehmomentbegrenzung und können auch von Hand verwendet werden.